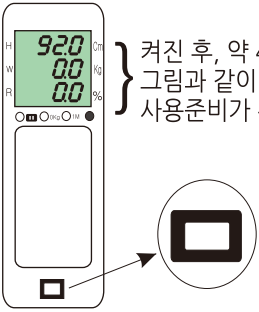
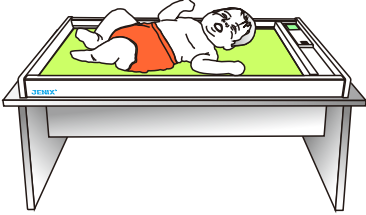
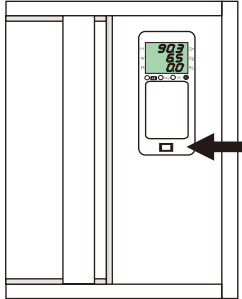
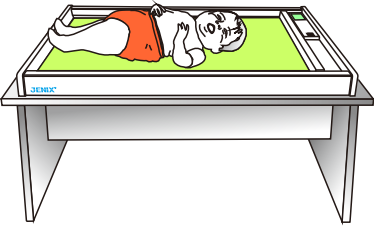
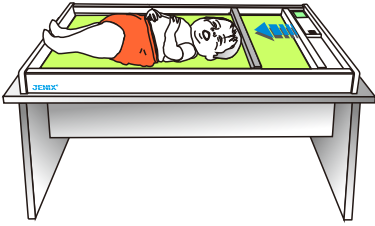
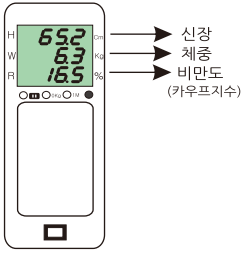


유아용 신장.체중.카우프지수 측정기 사용방법

모델명
DS-B03

- ☞ 체중을 먼저 측정하신 후 신장을 측정합니다.
- ☞ 전원이 " ON" 상태에서는 반복측정이 가능합니다.

전원을 켜기전 터치바가 제자리(우측끝)에 있는지 확인 합니다.

<p>1</p> <p>스위치를 2초간 눌러 체중계를 켵니다.</p>  <p>켜진 후, 약 4~5초가 지나서 그림과 같이 숫자가 표시되면 사용준비가 된것 입니다.</p>	<p>2</p> <p>아기를 테이블에 올려 놓습니다. (반드시 보호자가 아기와 함께 있어야 합니다.)</p> 	<p>3</p> <p>체중이 안정 되면 자동으로 세팅됩니다. (스위치를 눌러 체중을 세팅 할 수도 있음)</p> 
<p>4</p> <p>아기의 발을 측정기 좌측 끝 부분에 밀착시키고 무릎을 눌러 다리를 바른 자세로 유지시켜 줍니다.</p> 	<p>5</p> <p>머리가 움직이지 않게 하고 신장측정막대가 머리에 닿을때 까지 이동하여 신장을 측정 합니다.</p> 	<p>6</p> <p>신장, 체중, 카우프지수가 표시부에 함께 표시 됩니다.</p> 

! 주의 하세요

1. 측정중에는 아기로부터 눈을 떼지 마십시오.
2. 측정테이블 위의 무게가 1.0kg 미만일 경우, 자동으로 "0kg"으로 세팅 됩니다. (담요 등을 사용할 경우)
3. 측정도중, 측정바를 누르거나 체중계에 기대지 마십시오.
4. 전원스위치 ON/OFF 작동을 자주하지 마십시오.

AS문의/고객센터
02-2625-2222 (代)
공휴일, 매주 토.일 휴무입니다.