


## DS-102 영점세팅방법


- 준비물:
1.  $\Phi$  2mm인 길이7cm 의 구리선 2개
  2. 176cm 길이의 봉(막대) 1개
  3. 60Kgs 분동 1개

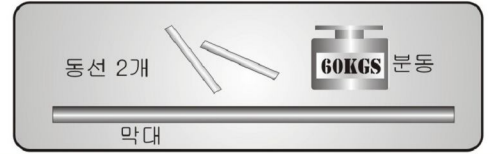


Step 1. 전원을 끕니다.

Step 2. 바닥에 있는 고무발을 조정하여 수평을 맞춥니다.


Step 3. ①번핀과 ②번핀을 옆의 그림과 같이 표시부의 측면에 있는 두개의 작은 구멍에 삽입시켜 줍니다.

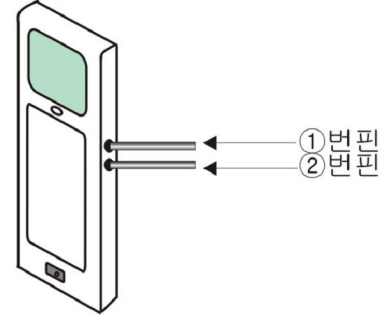


Step 4. 176cm 막대를 그림처럼 위치시킨 후 전원을 켜고 막대의 길이를 잽니다.

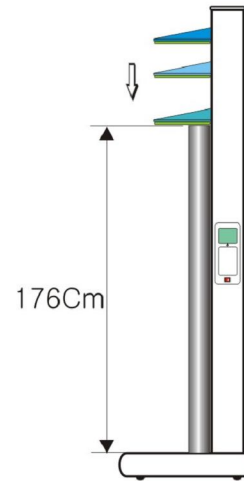

Step 5. ①번핀을 제거한 후 60kg 분동을 발판에 올려 놓고 무게를 측정합니다.

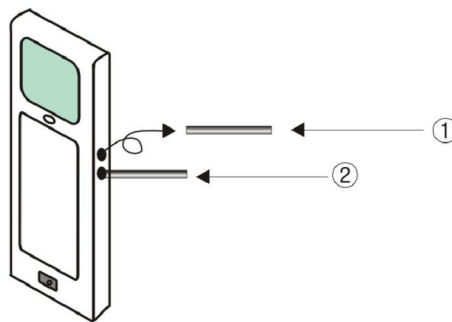

Step 6. 그다음, ②번핀을 제거하면 표시부의 숫자가 깜박거리고, 세팅이 완료됩니다.

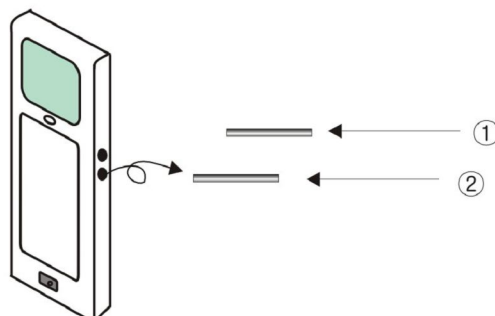

Step 7. 올려 놓았던 분동을 제거하고, 세팅이 되었는지 확인하기 위해 분동으로 측정을 합니다.