
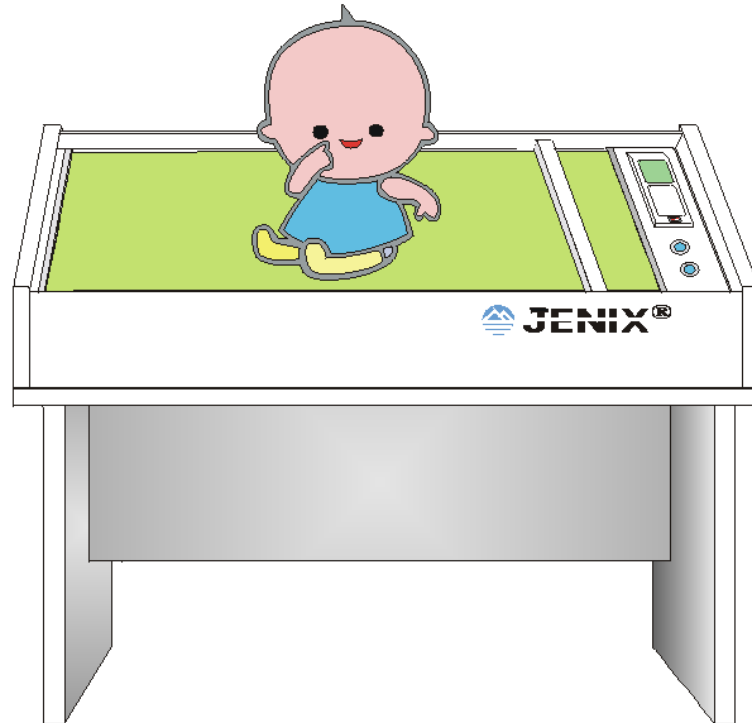


DS-B02

신생아/유아용 신장. 체중. 카우프지수 자동측정기

사용설명서

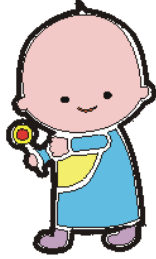



(주)동산제닉스

DONGSAHN JENIX CO.,LTD.

차 례

MODEL : DS-B02


1	테이블 조립 방법 및 순서	2
2	각부의 명칭 및 역할	4
3	측정방법 및 순서	5
4	측정시 주의사항	6
5	영양상태 판정기준(카우프지수)	7
6	문제발생시 조치방법	8
7	제품규격	9

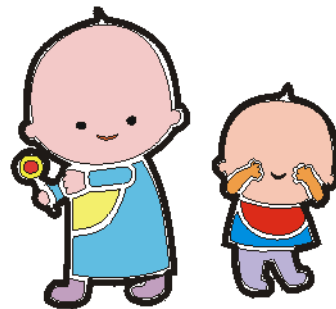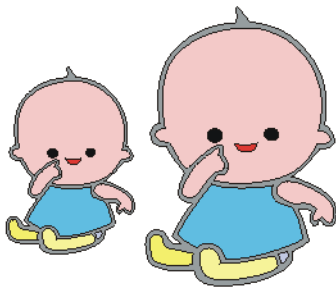

1 테이블 조립 방법 및 순서



테이블 조립 순서

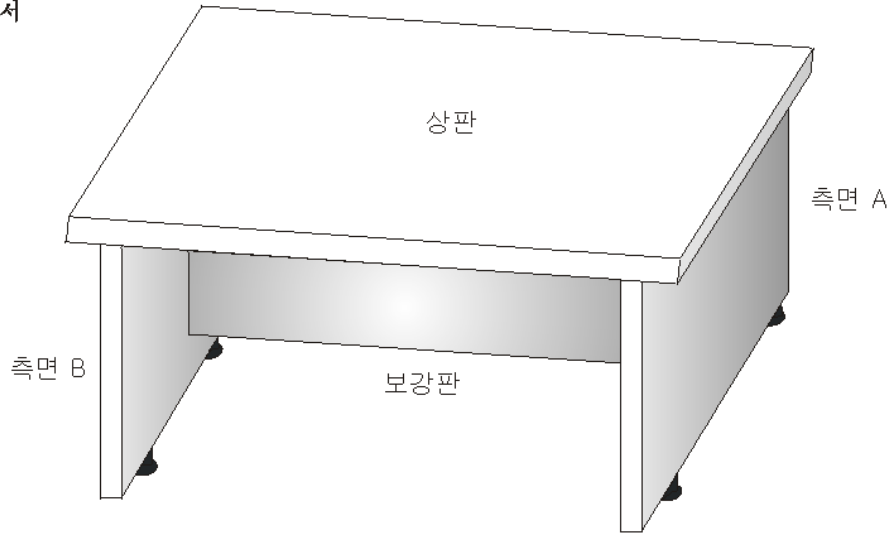

- 조립완성도 -


조립순서

<p>1 상판을 뒤집어 놓는다</p>	<p>2 볼트를 채운다.</p>
<p>3 측면A 판에 볼트를 채운다.</p>	<p>4 측면A 판을 상판에 세운다.</p>


테이블 조립 방법 및 순서




5 보강판을 상판위에 세운다.

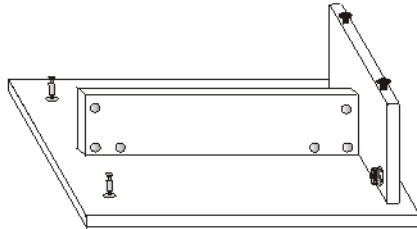


6 측면B 판을 상판위에 세운다.

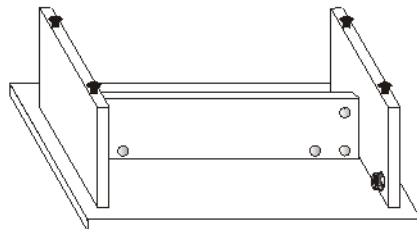

2 볼트를 고정되게 조인다.

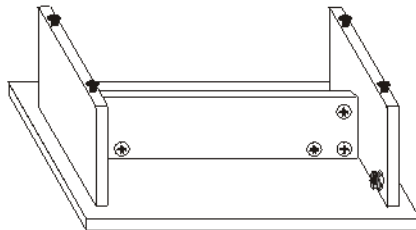


완성된 모습

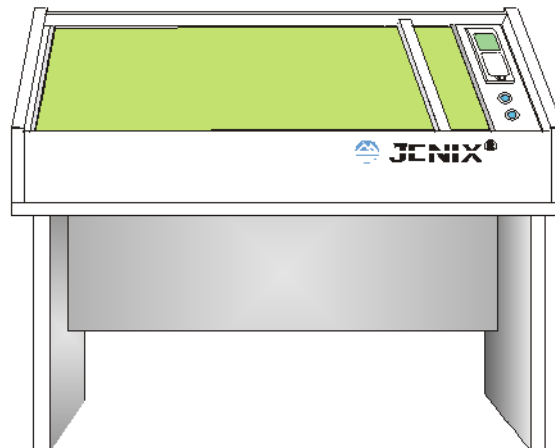

2 각부의 명칭 및 역할



명칭 및 역할

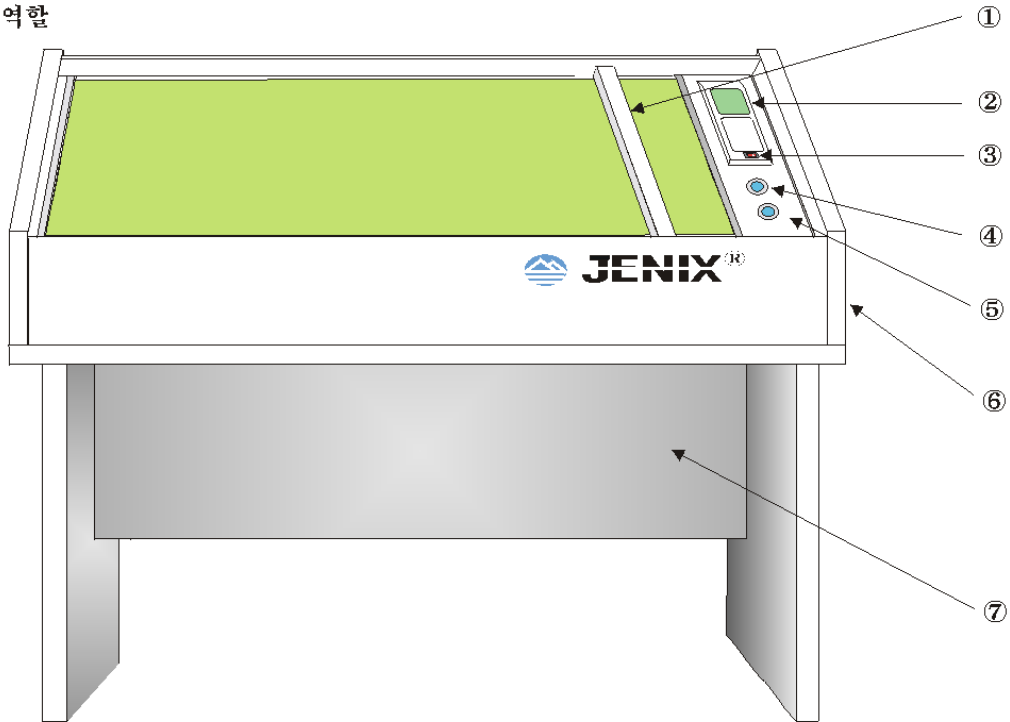

- | | |
|------------|-----------------|
| ① 신장 측정대 | ② 표시부 |
| ③ 전원 스위치 | ④ 영점셋팅 스위치 |
| ⑤ 체중셋팅 스위치 | ⑥ 전원 아답터 연결 콘넥터 |
| ⑦ 테이블 | |

1 스위치부

- ① 전원 스위치 : ON/OFF 작동시 사용.
- ② 영점 셋팅 스위치 : 체중 측정시 영점 셋팅을 할 때 사용한다.
- ③ 체중 셋팅 스위치 : 유아의 체중을 측정할때 사용한다.(유아가 움직이지 않고 바른자세로 있을때 사용)

2 표시부

- ① H : 신장 측정치
- ② W : 체중 측정치
- ③ R : 자동 연산된 유아의 카우프지수

3 전원부

전원 콘넥터 : 전원 아답터 연결 콘넥터


3 측정방법 및 순서




측정방법

측정 순서


1 ③번 전원 스위치를 ON 상태로 켜다.

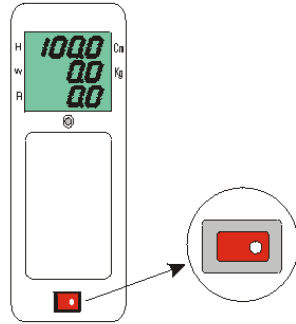


2 아기를 측정 테이블 위에 올려놓는다.

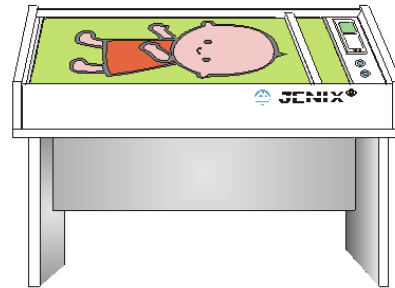


3 아기 체중이 안정 되었을때 체중 셋팅 스위치 누른다. (아기의 팔이나 다리가 측정기벽에 닿지 않도록 한다.)

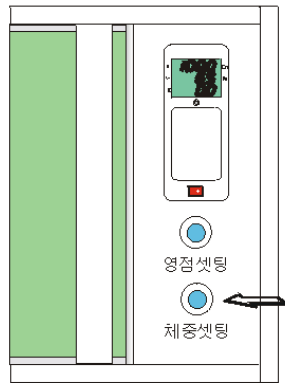


4 아기의 발을 측정기 좌측 끝 부분에 밀착시키고 무릎을 눌러 다리를 바른자세로 유지시켜 준다.

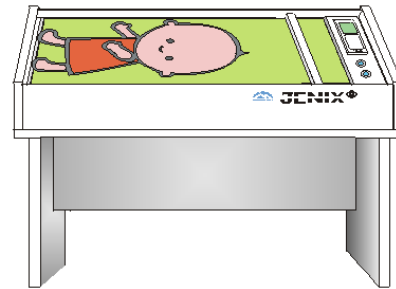


5 머리가 움직이지 않게 하고 신장 측정대가 머리에 닿을 때 까지 이동하여 신장을 측정합니다.

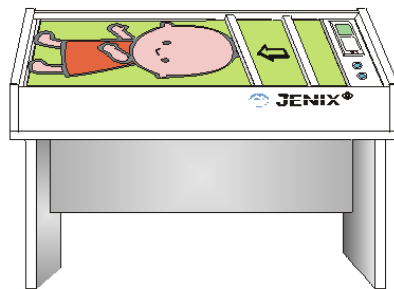

6 신장, 체중, 카우프지수가 표시부에 함께 표시 됩니다.

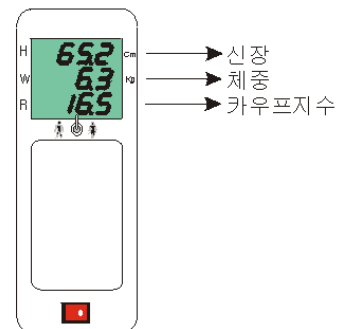


4 측정시 주의 사항

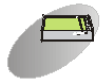


주의사항

측정시 주의 사항


1 측정이 끝나면 반드시 신장 측정대를 원위치로 옮겨 놓으세요. (오른쪽 끝으로)

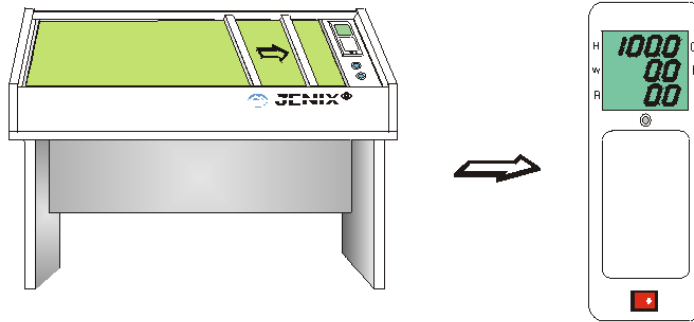


2 아기가 올라간 상태에서 영점셋팅을 누르면 안된다.

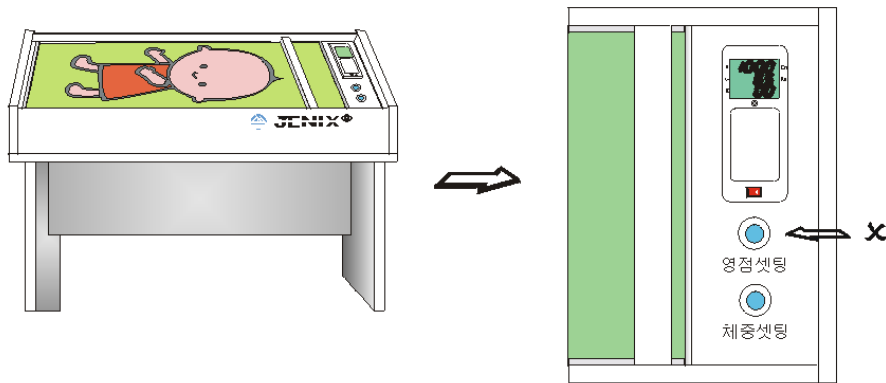

3 체중을 측정할 때 머리카락이나 발이 벽에 닿지 않도록 주의하세요.

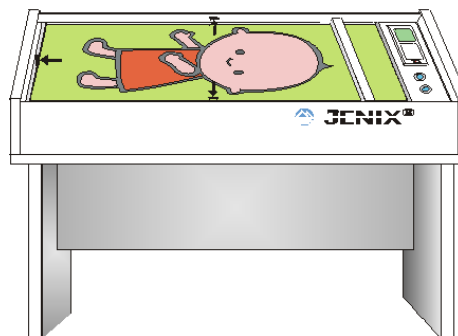

5 영양 상태 판정 기준(카우프지수)

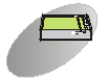

판정 기준

영양상태 판정 기준

카우프(KAUP) 지수


체중과 신장의 상관 관계를 산출하여 신생아/유아의 영양상태를 판정하는 지수

카우프지수의 산출 공식

$$\frac{\text{체중(Kg)}}{(\text{신장Cm})^2} \times 100^2$$

유아용 판정기준

- 13 ~ 15 : 영양상태 다소 안 좋음
- 15 ~ 18 : 보통
- 18 ~ 20 : 우량
- 20 이상 : 비만

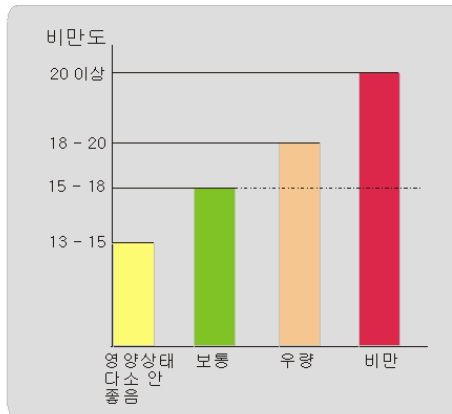

6 문제발생시 조치방법



조치방법

다음과 같이 해보세요

- 동작하지 않는다.

 - 전원 코드가 빠졌거나 느슨하게 끼워져 있는지 확인 한다.
 - 전원 공급이 제대로 되고 있는지 확인한다.
(사용전압 : AC220V)
- 체중이 이상하다.

 - 측정 테이블에 아무것도 없게 하고 영점 셋팅 스위치를 누른 후 다시 측정한다.
 - 다리나 손과 같이 신체의 일부분이 측정기 벽에 닿지 않는지 확인한다.
- 키가 맞지 않는다.

 - 터치바를 우측 끝으로 옮겼다가 다시 측정한다.
 - 아기의 발을 좌측 끝부분에 밀착했는지 확인한다.
 - 아기의 무릎을 눌러 다리를 바른자세로 유지하고 다시 측정한다.
 - 아기의 머리를 바른자세로 유지시키고 측정한다.
- 기타

 - 본 측정기는 정밀 측정 장비이므로 가능한 한 한 곳에 설치하여 사용하도록 한다.
 - 측정기를 자주 이동하여 사용하게 되면 약간의 오차가 발생할 수 있습니다.
 - 수평이 잘 맞게 조절한다.

주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

- 전원**
- 본 제품은 220V 전용입니다.
 - 코드부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요. 감전, 화재의 위험이 있습니다.

- 사용**
- 측정대(Touch Bar)는 매우 민감한 부분이므로 무리한 충격을 가하지 않는다.
 - 측정범위 이내에서 사용한다.
 - 측정시 아기의 팔이나 다리가 측정기 벽에 닿지 않도록 주의한다.
 - 아기의 머리가 움직이지 않게 하고 측정한다.
 - 아기가 올라 간 상태에서는 영점 셋팅 스위치를 누르지 않는다.
 - 측정이 끝나면 반드시 터치바를 오른쪽 끝으로 옮겨 놓는다. (터치바를 원위치 시킨다.)
 - 신생아/유아 이외의 다른물체를 측정하지 마세요.

- 정소**
- 물이나 액체를 쏟지 않도록 주의 하세요.
 - 전원플러그를 뺀 후 청소하고, 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나, 알콜 등으로 닦지 마시고 마른걸레로 닦아 주세요.


7 제품규격



제품규격

규격

항 목	내 용
품 명	유아용 신장. 체중. 카우프지수 자동 측정기
모 델	DS-B02
신 장	30 ~ 100Cm (최소눈금 :1mm)
체 중	0 ~ 30Kg (최소눈금 : 100g)
사 용 전 압	아답터 DC 12V 1A (220V 60Hz)
외 형 치 수	1180(W) × 530(D) × 180(H)
중 량	26Kg
품질보증기간	구입일로 부터 1년

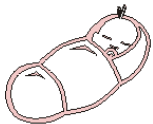

A/S 전화

고객센터 : 02-2625-2222~7

제품보증서

서비스에 대하여

- 저희 동산제닉스에서는 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입하신 대리점이나 고객센터 연락하세요.
- 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다. (무상 보증 기간은 1년)
- 제품의 부품보유 기간은 5년입니다.

제 품 명	신생아/유아용 신장, 체중, 카우프지수 자동측정기	모 델 명	DS-B02
구 입 일	년 월 일	제조번호	
대 리 점		금 액	

소비자 피해보상 안내

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에서 제품이 고장난 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.

소 비 자 피 해 유 형		보 상 내 역		
		보증기간 이내	보증기간 경과 후	
정상적인 사용상태 에서 발생한 성능, 기능상의 고장	구입 10일~1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능,기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환	—	
	제품구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생한 고장 일 경우	제품교환	—	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환	—	
	수리 가능	동일하자에 대하여 수리했으나 고장 재발시	제품교환	출장비
	수리 불가능	동일하자로 4회째 고장 발생시	제품교환	출장비
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시 (부품보유기간 이내)	—	신제품 보상교환 판매	
	수리용 부품이 없어 수리 불가능시	—	신제품 보상교환 판매	
	소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시	유상수리	유상수리	
	저희 A/S 직원이 아닌 다른 사람이 수리하여 고장 발생시	유상수리	유상수리	
기 타	사용전압을 달리 사용하여 고장 발생시 (AC 220V 사용)	유상수리	유상수리	
	설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의해 고장, 손상 발생시	유상수리	유상수리	
	제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 고장	유상수리	유상수리	
● 천재지변(화재, 염해, 수해, 지진 등)에 의한 고장이 발생하였을 경우 ● 소모성 부품의 수명이 다한 경우		유상수리		

이 보증서는 재발행되지 않습니다.



(주)동산제닉스

서울특별시 구로구 궁동 285-1



(주)동산제닉스

서울특별시 구로구 궁동285-1 동산빌딩

TEL : (02) 2625-2222~7
FAX : (02) 2625-2228
U.R.L : WWW.jenix.co.kr
E-mail : jenix@unitel.co.kr